



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة: إدارة فحوصات التدنر	رمز السياسة:
عدد الصفحات: 5	الطبعة: الأولى

MOH	POL	D	ID	02
-----	-----	---	----	----

الوحدة التنظيمية: مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية		
الجهة المعنية بتنفيذ السياسة : المختبر المرجعي للس/ مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية		
الإعداد: د. خالد عكه	التوقيع:	تاريخ الاعداد : 2024/5/19
القسم / اللجنة : قسم التدنر	التوقيع:	تاريخ التدقيق : / /
التدقيق والمراجعة من قبل مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين والصحة المهنية الدكتور ابراهيم فلاح المعاينة	التوقيع:	تاريخ تدقيق ضبط الجودة: ٢٠٢٤/٥/٢٠
التدقيق من ناحية ضبط الجودة: مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة	التوقيع:	تاريخ تدقيق ضبط الجودة: ٢٠٢٤/٦/٢٣
الاعتماد: الأمين العام للشؤون الإدارية والفنية	التوقيع:	تاريخ الاعتماد: ٢٠٢٤/٦/٢٧

وزارة الصحة
مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة
السياسات والإجراءات
Policies & Procedures

ختم الاعتماد ٢٠٢٤

معتمة
Approved

تتم مراجعة السياسة كل سنتين على الأقل من تاريخ اعتماد آخر طبعة :		
رقم الطبعة	تاريخ الاعتماد	مبررات مراجعة السياسة

ختم النسخة الاصلية

MASTER COPY



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

اسم السياسة: إدارة فحوصات التدرن					رمز السياسة:
MOH	POL	D	ID	02	
عدد الصفحات: 5					الطبعة: الأولى

موضوع السياسة:

كيفية ادارة العينات داخل مختبر التدرن

الفئات المستهدفة:

فنيي المختبر المرجعي للسل.

الهدف من السياسة /المنهجية:

1. ضمان تقديم الخدمة لمتلقيها بجودة عالية وعلى أكمل وجه.
2. ضمان مطابقة العينة مع نموذج الفحص المخبري لنفس المريض.
3. ترتيب وتنسيق العمل بالفحوصات الخاصة بالتدرن.
4. الإسراع في اتخاذ إجراءات في الاستجابة لعزل المريض وبدء العلاج.
5. إنشاء قنوات اتصال وتواصل بين المختبر المرجعي مع مقدم الرعاية الطبية المسؤول (طالب فحص المختبر).

التعريفات:

المختبر المرجعي للسل: مختبر مجهز بالأجهزة والمعدات ومخصص للتحاليل الشاملة الخاصة بمرض السل، ويعد هو المختبر المرجعي الوطني للسل في المملكة الأردنية الهاشمية، ويقدم خدمات تشخيصية متكاملة لمرض السل وذلك وفقاً لمعايير وتوجيهات منظمة الصحة العالمية

(MTB RIF ultra, MTB XDR, CULTURE, AFB, LPA, DST, QUANTIFERON)

يتم في مختبر السل المرجعي إجراء مجموعة واسعة من الفحوصات والتحاليل وفق آخر ما توصلت إليه تقنيات التحاليل الطبية لتمكين الأطباء والفرق الطبية في مراكز الأمراض الصدرية والمستشفيات من الحصول على النتائج والبيانات وبالتالي الوصول إلى النتائج التشخيصية الإكلينيكية ومن ثم مراقبة التطورات والتغيرات التي تطرأ على حالات المرضى أثناء علاجهم.

مسؤول المختبر: الشخص المسؤول عن التخطيط والتنظيم والإشراف على الموظفين العاملين في المختبر.



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

رمز السياسة:					اسم السياسة: إدارة فحوصات التدن
MOH	POL	D	ID	02	
الطبعة: الأولى					عدد الصفحات: 5

فني المختبر: الشخص المسؤول عن تقديم خدمات طبية مخبرية.

المراجع: هو متلقي الخدمة سواء كان مريض أو مبتعث... الخ

الأدوات:

1. نموذج الفحوصات المخبرية أو استقبال حكيم.
2. لاصق تعريفى خاص بحكيم.
3. قلم خاص لكتابة الرموز على العينات بحيث لا يتم مسحه.
4. السجل المخبري الورقي والسجل الطبي الإلكتروني (حكيم + DHIS).
5. الأجهزة والمواد والمعدات المخبرية الخاصة بفحوصات التدن.
6. معدات خاصه بإدارة النفايات الطبية.

الإجراءات:

1. يقوم مسؤول المختبر بالتأكد من توفر المعرفة والكفاءة الكافية لجميع العاملين في المختبر والقدرة على تقديم الخدمة بأسرع وقت ممكن مع مراعاة الحالة المرضية للمراجعين وإعطاء الأولوية للحالات حسب الأنظمة والقوانين.
2. يتم استقبال العينات أو المراجع بنموذج حكيم محدد الفحص الخاص بفحوصات التدن من قبل الطبيب.
3. يقوم فنيو المختبر بما يلي:

- 3.1 يتم التأكد من قبل فني المختبر من جودة العينة الخاصة بفحص التدن.
- 3.2 ترقيم وترميز العينة بنفس الرقم أو الرمز الموجود على نموذج الفحص المخبري.
- 3.3 يتم عمل الفحص المجهرى للعينة محدد بإحدى الصبغات المعتمدة لجراثومة السل.
- 3.4 في حال النتيجة السلبية في الفحص المجهرى (عدم التمكن من رؤية البكتيريا السلية) يتم إدخالها على البرنامج الخاص بوزارة الصحة حكيم.

[Handwritten signature]



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

رمز السياسة:					اسم السياسة: إدارة فحوصات التدرن
MOH	POL	D	ID	02	
الطبعة: الأولى					عدد الصفحات: 5

- 3.5 في حال النتيجة الإيجابية في الفحص المجهرى (التمكن من رؤية البكتيريا السلية) يقوم فني المختبر بإبلاغ الطبيب المسؤول حسب آلية التبليغ المعتمدة في المختبر المرجعي للسل.
- 3.6 يتم عمل فحوصات مؤكدة لإيجابية العينة السلية (*Mycobacterium tuberculosis* (MTB) bacteria.) بفحص MTB /RIF ULTRA.
- 3.7 إدخال العينة الإيجابية السلية قسم الزراعة على وسطين زراعيين خاصات بجرثومة السل (الوسط السائل والصلب).
- 3.8 بعد التأكد من الإيجابية المؤكدة لجرثومة التدرن عن طريق عمل فحص مجهرى للمستعمرات البكتيرية وكذلك فحص (TbC) ومن ثم فحص التحسس الجرثومي ضد أدوية السل الخط الأول والثاني بطريقتين مختلفتين:
- 3.8.1 النمط الظاهري (D S T).
- 3.8.2 النمط الجيني (LPA).
- 3.9 يتم عمل فحص اختبار مقايضة إطلاق إنترفيرون غاما (اختبار IGRA) من خلال سحب عينة دم للمريض للكشف عن السل الكامن.
- 3.10 مراعاة ضبط الجودة المخبرية لكافة الفحوصات المخبرية المذكورة أعلاه.
- 3.11 ادخال نتائج الفحوصات المخبرية الإيجابية على النظام المعتمد لوزارة الصحة حكيم ونظام السجل الخاص بمرضى السل المتبع بالمديرية (DHIS2) والسجل المخبري الورقي في المختبر.
- 3.12 ادخال نتائج الفحوصات عامة على السجل المخبري الورقي والنظام المعتمد لوزارة الصحة حكيم سواء كانت سلبية أم إيجابية.

MASTER COPY



وزارة الصحة
سياسات وإجراءات

رمز السياسة:					اسم السياسة: إدارة فحوصات التدرن
MOH	POL	D	ID	02	
الطبعة: الأولى					عدد الصفحات: 5

النماذج / المرفقات:

لا يوجد

مؤشرات الاداء:

1. عدد الحالات الإيجابية التي تم تبليغها ربعياً وسنوياً.
2. عدد العينات التي تم إنجازها ربعياً وسنوياً.

المراجع:

1. استراتيجية وزارة الصحة.
2. Practical manual of tuberculosis laboratory strengthening by WHO and GLI, 2022

MASTER COPY